



PROMANU

Skinner og håndledsbandager
tilpasset og tiltænkt danske hænder



PROMANU®

Tankerne bag vores bandager

Intentionerne og tankerne bag hele PROMANU serien er, at produkterne er tilpasset og tiltænkt det danske marked, både hvad angår design og kvalitet, men i allerhøjeste grad også hvad angår pasform.

Vores mangeårige erfaring med salg af bandager og skinner til hele OE har givet os et fundament og udgangspunkt for egen produktion. Vi har lyttet til de mange forslag om ændringer og tilpasninger, som terapeuter og bandagister har bedt os om, og taget udgangspunkt i de

biomekaniske og anatomiske forhold, som er nødvendige for en optimal bandage.

Samtidig har vi forsøgt at dække de mest gængse problematikker, som hæfter sig til hænder og arme. Problematikker som hæmmer personers dagligdag i form af smerter og funktionsnedsættelser.

Vi har forsøgt at finde materialer, som dækker bredt i forhold til komfort og hygiejne, og som er af høj kvalitet. Vi synes selv, at vi er kommet til en løsning, som dækker bredt i

forhold til pasform, materialevalg, komfort og hygiejne, og som er over-skuelige og simple, når valget skal træffes på bandager.

Vores PROMANU bandager bliver produceret i Skotland. Denne fabrik har igennem mange år leveret varer til hele verden, og alle produkter er fremstillet ud fra fabrikkens kunders individuelle design og behov. Deres kvalitet er meget høj, og alle produkter kommer gennem en kvalitetssikrings-afdeling inden afsendelse.

Materialer

De materialer, som vi har valgt til vores PROMANU bandager, er nøje udvalgt, idet det er produkter, som vi har oplevet i andre sammenhænge, og som vi har haft kendskab til og erfaring med igennem mange år. Vores erfaring er, at det er produkter med stor slidstyrke og optimal holdbarhed. Alle produkter er af høj kvalitet.



Alfa er et elastisk tekstil, som består af bomuld, nylon og gummi. Det er et hudvenligt materiale, der er strækbar i én retning, nemlig rundt om hånden. Herved opnås optimal tilpasning til håndens forskellige konturer og knoglefremspring. Fås i farven beige.



Lycra Fleece med fleecfoer er et genialt materiale, som giver varme til hånden.

Materialet er elastisk og følger nemt håndens konturer.

Velegnet til patienter med sårbar hud eller ved kuldefølsomme personer. Farven er sort.



Ventoprene er et neopren produkt, som er perforeret for at opnå optimal luftcirkulation

til huden. Materialet er velegnet ved brug i fugtigt miljø, da det tørrer meget hurtigt.

Kan også bruges, hvis brugeren træner i bassin. Farven er beige. De i oversigten nævnte indikationer

for anvendelse er kun forslag. En faglig vurdering af læge, terapeut eller bandagist er nødvendig i tvivlstilfælde. Herudover kan det være nødvendigt med faglig rådgivning og hjælp ved tilpasning og udlevering af en bandage. Sidder bandagen ikke korrekt, opnås det optimale udbytte ikke. En forkert bandage eller forkert pasform kan virke negativt og give problemer i form af smerter og fejlbelastning.

Brugsanvisning for håndledsbandager

For at få det bedste resultat ved brug af PROmanu håndledsbandager anbefaler PROcare, at vurdering af model, måltagning og endelig tilpasning foretages af en professionel person, som har uddannelse og erfaring med tilpasning af bandager. Ved spørgsmål vedrørende vores produkter, kontakt da den person, som har taget mål til og tilpasset bandagen eller kontakt PROcare.

Anvendelsesområder

Bandagen støtter og aflaster brugerens hånd, håndled og underarm efter skade, operation, kroniske smertetilstande, slid-gigt eller overbelastnings-problematikker. Det kan være nødvendigt at justere velcrobåndene med jævne mellemrum, afhængig af i hvilken situation bandagen benyttes.

Det er vigtigt, at bandagen sidder bekvemt uden at klemme eller irritere. Hvis der opleves problemer med bandagen, kontakt da den person, som har taget mål til og tilpasset bandagen eller PROcare.

Tilpasning

- 1** Skinnen i bandagen, tages ud af "lommen". Tilpas skinnen, så den følger håndleddets konturer og vinkler, ud fra brugerens hånd og behov. Placer skinnen i "lommen" igen.
- 2** Åbn samtlige velcrobånd og placer hånden i bandagen. Luk først ved tomlen, træk bandagen på plads, og luk herefter det midterste velcrobånd og herefter resten.
- 3** Juster samtlige velcrobånd, så de sidder optimalt, uden at huden kommer i klemme.
- 4** Klip overflødigt velcrobånd af, så bandagen ser pænere ud. Lad dog et par ekstra mm være så der er lidt at tage fat i.


Vask

Alle PROmanu håndledsbandager – uanset materiale – kan vaskes i vaskemaskine ved 30°.

Forud for vask skal en eventuel stabiliserende skinne fjernes og alle velcrobånd lukkes. Det anbefales at benytte en vaskepose.



**PROmanu®
Model 5110**

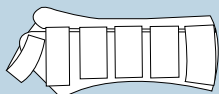

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5110LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5110RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5110LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5110RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5110LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5110RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5110LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5110RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5110LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5110RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



**Mål
omkring
håndled**



3 Piece Wrist Beige – Håndledsbandage med "omvendt lukning"



Bandagens funktion: Stabiliserer håndled i funktionsstilling.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, følger efter håndledsbrud, tennis-/golfalbue, lammelser, tendinitis i håndled.

Beskrivelse: Ideen med den "omvendte lukning" er, at man kan "lægge" velcrobåndene omkring hånden, for bagefter at justere trækket med mindre bevægelser og træk/belastning af fingre. Når bandagen skal af, kan flere fingre tage fat i velcrobåndene og åbne samtidig. Dvs. mindre belastning af de små led. Stroppen ved tommel lukker mere over mod ulnar side, end opad skinnen, og vil dermed ikke stramme ned i første interstis, men ligge op ad 2. metacarpalknogle.


Trækretning af velcrobånd: Ulnart mod radiale.



Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5110LXS	5110RXS
Small	A = 14-16 cm	5110LS	5110RS
Medium	A = 17-19 cm	5110LM	5110RM
Large	A = 20-22 cm	5110LL	5110RL
X-large	A = 23-25 cm	5110LXL	5110RXL

**PROmanu®
Model 5116**

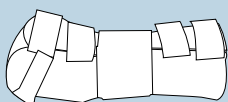

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5116LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5116RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5116LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5116RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5116LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5116RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5116LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5116RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5116LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)


DAGSPRIS **Art: 5116RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



**Mål
omkring
håndled**



3 Piece Wrist Strap
– Håndledsbandage til mere kraftbetonet funktion

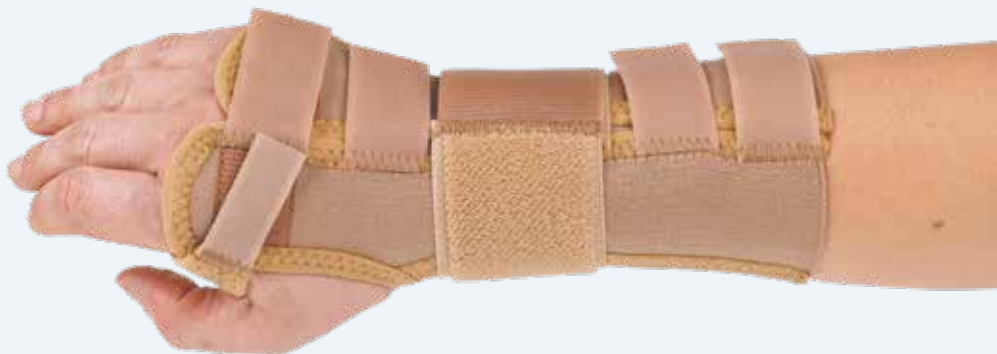

Bandagens funktion: Stabiliserer håndled i funktionsstilling.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, følger efter håndledsbrud, tennis-/golfalbue, lammelser, tendinitis i håndled.

Beskrivelse: En meget stabil håndledsbandage, som kan stabilisere håndled ved større belastninger.

Selve skinnen er volart mere rigid end de øvrige af vores bandager.

Bånd omkring håndleddet øger stabiliteten.


Trækretning af velcrobånd: Radialt mod ulnart.



Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5116LXS	5116RXS
Small	A = 14-16 cm	5116LS	5116RS
Medium	A = 17-19 cm	5116LM	5116RM
Large	A = 20-22 cm	5116LL	5116RL
X-large	A = 23-25 cm	5116LXL	5116RXL

**PROmanu®
Model 5119**

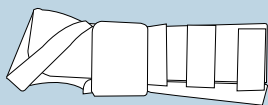

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5119LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5119RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5119LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5119RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5119LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5119RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5119LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5119RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5119LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5119RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



**Mål
omkring
håndled**



Universal wrist– lang model Beige
– Håndledsbandage til mere kraftbetonet funktion



Bandagens funktion: Stabiliserer håndled i funktionsstilling.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, følger efter håndledsbrud, tennis-/golfalbue, lammelser, tendinitis i håndled.

Beskrivelse: En meget stabil håndledsbandage, som kan stabilisere håndled ved større belastninger.

Selve skinnen er volart mere rigid end de øvrige af vores bandager.

Bånd omkring håndleddet øger stabiliteten.

Selve bandagen går længere op ad underarmen og fordeler derved tryk og belastning ved brug.

Trækretning af velcrobånd: Radialt mod ulnart.



Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5119LXS	5119RXS
Small	A = 14-16 cm	5119LS	5119RS
Medium	A = 17-19 cm	5119LM	5119RM
Large	A = 20-22 cm	5119LL	5119RL
X-large	A = 23-25 cm	5119LXL	5119RXL

**PROmanu®
Model 5140**



X-Small

DAGSPRIS **Art: 5140LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5140RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5140LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5140RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5140LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5140RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5140LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5140RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5140LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5140RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



**Mål
omkring
håndled**



Thumb Spica Beige – Tommelbandage med håndledsstabilisering



Bandagens funktion: Let stabilisation af håndled og tommel.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, påvirkninger af n. medians, de Quervain, smerter i tommels rod- og grundled.

Beskrivelse: Denne tommelbandage har en fantastisk pasform, da den har et vinklet træk omkring håndleddet.

Det vinklede træk bevirker, at håndleddet lægger sig tættere omkring håndleddet og giver en god støtte både ved håndled og tommel.

Den lille skinne ved tommel er fjedrende og giver let stabilitet.


Trækretning af velcrobånd: Radialt mod ulnart.



Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5140LXS	5140RXS
Small	A = 14-16 cm	5140LS	5140RS
Medium	A = 17-19 cm	5140LM	5140RM
Large	A = 20-22 cm	5140LL	5140RL
X-large	A = 23-25 cm	5140LXL	5140RXL

PROmanu[®]
Model 5150

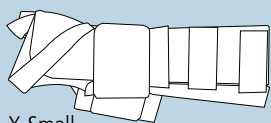

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5150LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5150RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5150LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5150RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5150LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5150RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5150LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5150RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5150LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5150RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



Mål omkring håndled



Lang Thumb Spica – Tommelbandage med håndledsstabilisering



Bandagens funktion: Stabilisation af håndled og tommel.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, påvirkninger af n. medians, de Quervain, smerter i tommels rod- og grundled.

Beskrivelse: Denne tommelbandage har en fantastisk pasform, da den har et vinklet træk omkring håndledet, samt et ekstra bånd til stabilisering af håndledet. Det vinklede træk bevirker, at håndledsdelen lægger sig tættere omkring håndledet og giver en god støtte både ved håndled og tommel, mens det ekstra bånd yder større stabilisering. Den lille skinne ved tommel er fjedrende og giver let stabilitet.


Trækretning af velcrobånd: Radialt mod ulnart.



Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5150LXS	5150RXS
Small	A = 14-16 cm	5150LS	5150RS
Medium	A = 17-19 cm	5150LM	5150RM
Large	A = 20-22 cm	5150LL	5150RL
X-large	A = 23-25 cm	5150LXL	5150RXL

PROmanu[®]
Model 5710

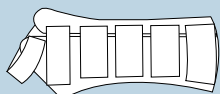

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5710LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5710RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5710LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5710RS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5710LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5710RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5710LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5710RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5710LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5710RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



Mål omkring håndled



3 Piece Wrist – Ventoprene – Håndledsbandage med "omvendt lukning"



Bandagens funktion: Stabiliserer håndled i funktionsstilling.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, følger efter håndledsbrud, tennis-/golfalbue, lammelser, tendinitis i håndled.

Beskrivelse: Ideen med den "omvendte lukning" er, at man kan "lægge" velcrobåndene omkring hånden, for bagefter at justere trækket med mindre bevægelser og træk/belastning af fingre. Når bandagen skal af, kan flere fingre tage fat i velcrobåndene og åbne samtidig. Dvs. mindre belastning af de små led. Stroppen ved tommel lukker mere over mod ulnar side, end opad skinnen, og vil dermed ikke stramme ned i første interstits, men ligge op ad 2 metacarpalknogle.


Trækretning af velcrobånd: Ulnart mod radiallyt.



Bestillingskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5710LXS	5710RXS
Small	A = 14-16 cm	5710LS	5710RS
Medium	A = 17-19 cm	5710LM	5710RM
Large	A = 20-22 cm	5710LL	5710RL
X-large	A = 23-25 cm	5710LXL	5710RXL

**PROmanu®
Model 5740**

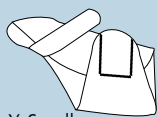

X-Small

DAGSPRIS **Art: 5740LXS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5740RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Small

DAGSPRIS **Art: 5740LS**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5740RXS**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Medium

DAGSPRIS **Art: 5740LM**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5740RM**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

Large

DAGSPRIS **Art: 5740LL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5740RL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)

X-Large

DAGSPRIS **Art: 5740LXL**
KLIK HER (VENSTRE BEIGE)

DAGSPRIS **Art: 5740RXL**
KLIK HER (HØJRE BEIGE)



**Mål
omkring
håndled**



Thumb Spica – Ventoprene
– Tommelbandage med håndledsstabilisering



Bandagens funktion: Let stabilisation af håndled og tommel.

Indikation: Gigt, smerter i håndled, påvirkninger af n. medians, de Quervain, smerter i tommels rod- og grundled.

Beskrivelse: Denne tommelbandage har en fantastisk pasform, da den har et vinklet træk omkring håndleddet. Det vinklede træk bevirker, at håndleddet lægger sig tættere omkring håndleddet og giver en god støtte både ved håndled og tommel. Den lille skinne ved tommel er fjedrende og giver let stabilitet.

Trækretning af velcrobånd: Radialt mod ulnart.

Bestillingsskema

Størrelse	Mål omkring håndled	Venstre	Højre
X-small	A = 11-13 cm	5740LXS	5740RXS
Small	A = 14-16 cm	5740LS	5740RS
Medium	A = 17-19 cm	5740LM	5740RM
Large	A = 20-22 cm	5740LL	5740RL
X-large	A = 23-25 cm	5740LXL	5740RXL